## <u>SP テスター 設定・データソフトウェア インストール手順</u>

1、弊社ホームページの SP テスターページ内の『ダウンロード』をクリックすると別フォルダ (Sptester\_setup\_102. zip)に移ります。





2、移動したフォルダ (Sptester\_setup\_102. zip) 内の<u>"setup.exe"</u>をダブルクリックしてください





3、『次へ』をクリックし『インストール先のフォルダの選択』画面が表示されます。

🥵 SPテスター設定・データソフト	
インストール フォルダの選択	
インストーラは以下のフォルダへ SPテスター設定・データソフト をイン このフォルダヘインストールためには「次へ」をクリックしてください。他 ールするためには、以下に入力するかまたは「参照」をクリックしてくた	バストールします。 9のフォルダヘインスト ざさい。
フォルダ(E): ○¥Program Files¥SPテスター設定・データソフト¥ ソフトウェアを以下のドライブにインストールできます(⊻):	参照( <u>B</u> )
ボリューム	ディスク容量
	111GE
	>
<u> </u>	イスク所要量(D)
キャンセル( <u>©</u> ) 戻る(P)	( X~W

インストール先を選択し『次へ』をクリック。



4、『インストールの確認』画面が表示されます。

🐻 SPテスター設定・データソフト	
インストールの確認	
SPテスター設定・データソフト をコンピュータにインストールする準備が	できました。
インストールを開始するためには「次へ」をクリックしてください。	
キャンセル(C) 戻る(P)	<u>ˈ/☆へ₪</u>

『次へ』をクリック。

5、インストールが始まります。

👹 SPテスター設定・データソフト	
SPテスター設定・データソフト をインストールし ています	
SPテスター設定・データソフト をインストールしています。	
キャンセル(Q) 戻る(P)	☆^(\)



6、インストール完了後、下記の画面が表示されます。



『閉じる』をクリックしてください。インストール完了です。



7、設定・データソフトウェアの起動方法

スタートメニューから『すべてのプログラム』 – 『Tri-tech』 – 『SP テスター設定・デ ータソフト』をクリックしてください。

下記の画面が表示されます。

SPテスター 設定・データソフト(V1.02)										
								<mark>未接</mark>	売 一	
	<b>データ収集</b> 設定 SPテスター s/n									
F										
				デー	ター切	、集				
		1								
	N0.	シリンジボンプRFID	管理番号	測定日	測定時刻	流量設定 (ml/h)	流重測定結果    (%)	閉塞設定	閉塞測定結果 (kpa)	
									<u> </u>	
					I				<u> </u>	

